



Sostituzione Pannello Anteriore dell'unità paziente del ventilatore Servo-i

Come aprire l'unità paziente e disassemblarla per la manutenzione.


Scritto Da: Jeff Suovanen



INTRODUZIONE


La manutenzione o riparazione dei componenti interni dell'unità paziente richiede la rimozione del pannello anteriore.

Passo 1 — Pannello anteriore dell'unità paziente

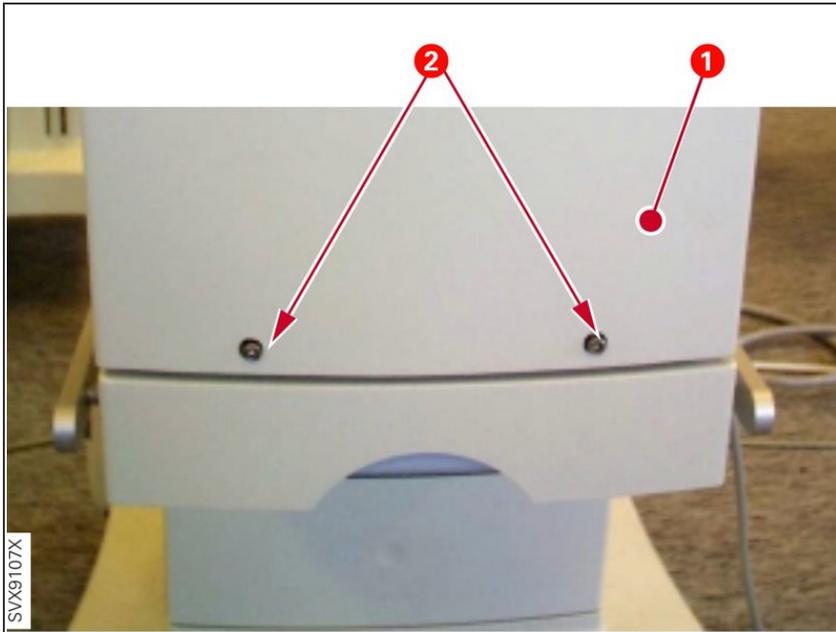

- Rimuovi le due viti (2) che tengono chiuso il pannello anteriore (1).

Passo 2

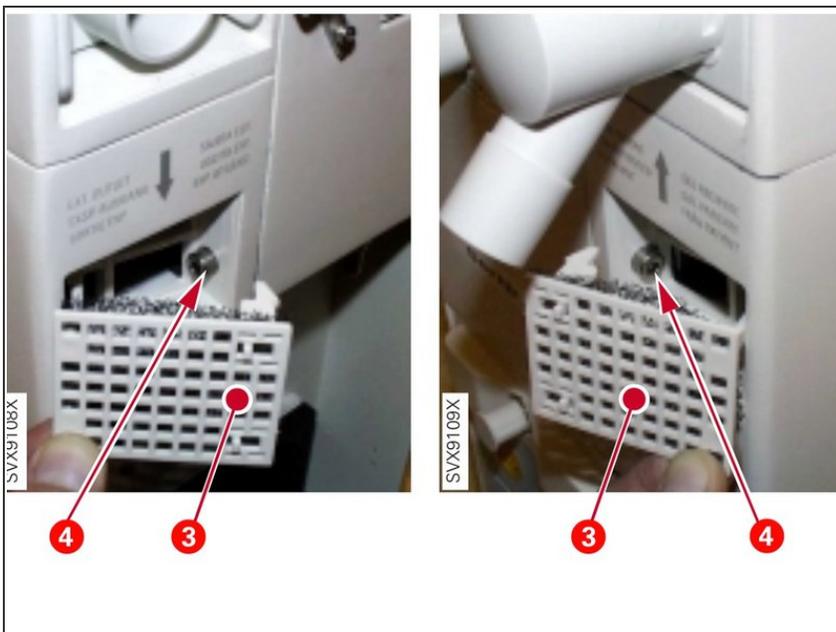

- (3) Rimuovi le due griglie di ventilazione.
- (4) Rimuovi la vite sotto ogni griglia di ventilazione (due viti in totale).

Passo 3



- Sollevare e rimuovere il pannello anteriore dall'unità paziente.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.