




Sostituzione motore della pompa ResMed AirSense 10

Questa guida include uno smontaggio completo...

Scritto Da: Jacey Cobb

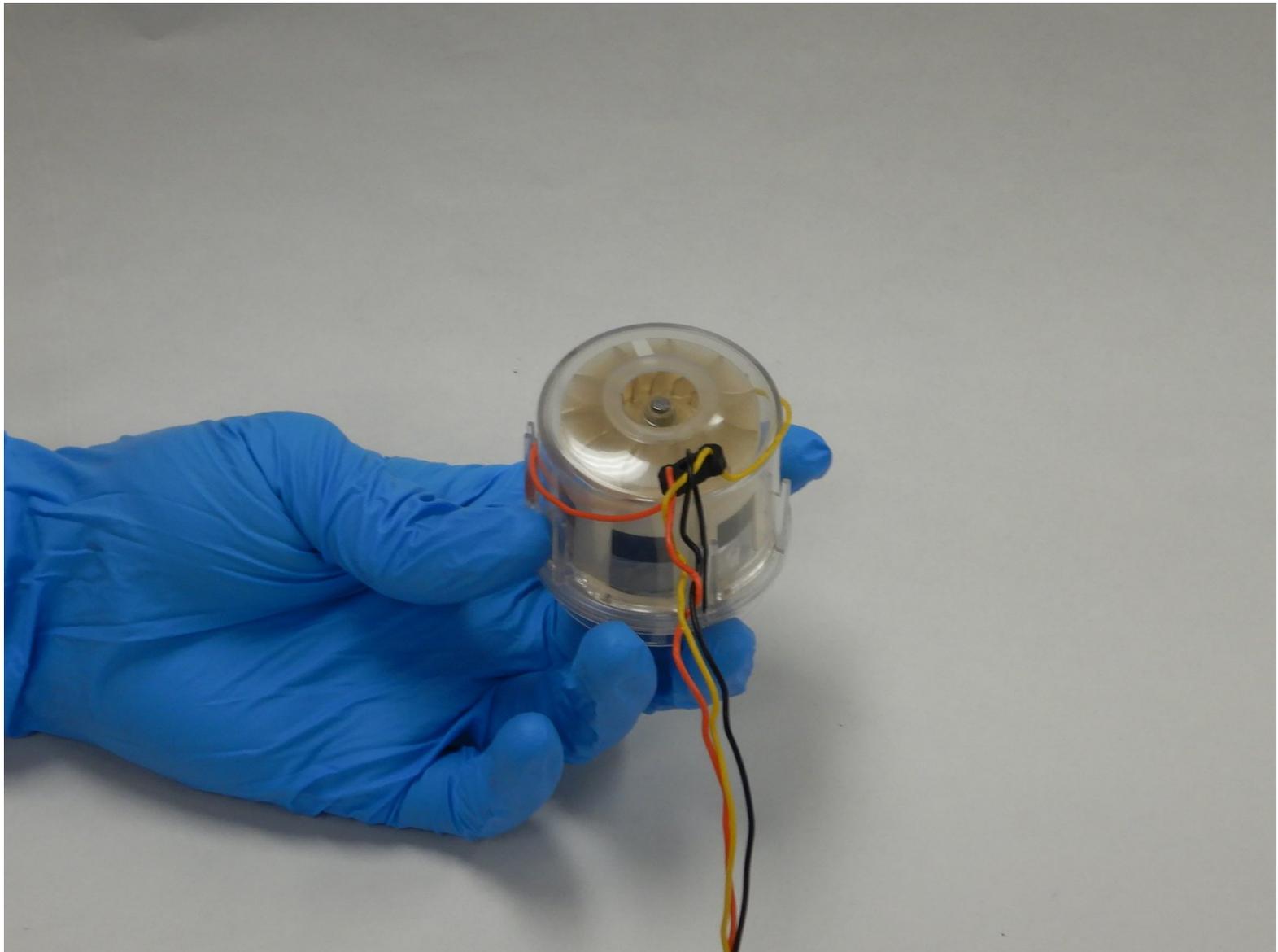

INTRODUZIONE

Questa guida include uno smontaggio completo per raggiungere il motore della pompa per pulirla o sostituirla. Se l'unità è di seconda mano, questa guida ti permetterà di controllare e pulire tutte le componenti nel ResMed AirSense 10.



STRUMENTI:

- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Passo 1 — Motore della pompa



- Posiziona il ResMed AirSense 10 con il serbatoio dell'acqua rivolto verso di te.
- Prendi sia la parte superiore che quella inferiore del serbatoio dell'acqua e tirale via dal dispositivo.

Passo 2



- Posiziona il ResMed AirSense 10 con lo schermo rivolto verso di te per rimuovere la placca di copertura anteriore.
- Posiziona un dito sotto l'indentazione sotto al tasto home e fai leva per rimuovere la placca di copertura anteriore.
- ⓘ Questo dovrebbe richiedere solo una forza media.

Passo 3



- Svita le due viti Torx T10 da 14 mm che hai scoperto rimuovendo la placca di copertura anteriore.

Passo 4




- Ruota il dispositivo fino a rivolgere la parte inferiore del ResMed AirSense 10 verso di te.
 - Svita le quattro viti Torx T10 da 10 mm, quindi mettile da parte con la placca di copertura in plastica del riscaldatore.
 - Svita le due viti Torx T10 da 14 mm rimaste.

Passo 5



- Dopo aver rimosso la copertura della placca riscaldante, scollega il cavo arancione dal fusibile.
- Tira attentamente il cavo arancione attraverso la guarnizione in silicone.
- Rimuovi del tutto la placca riscaldante dal ResMed AirSense 10.

Passo 6

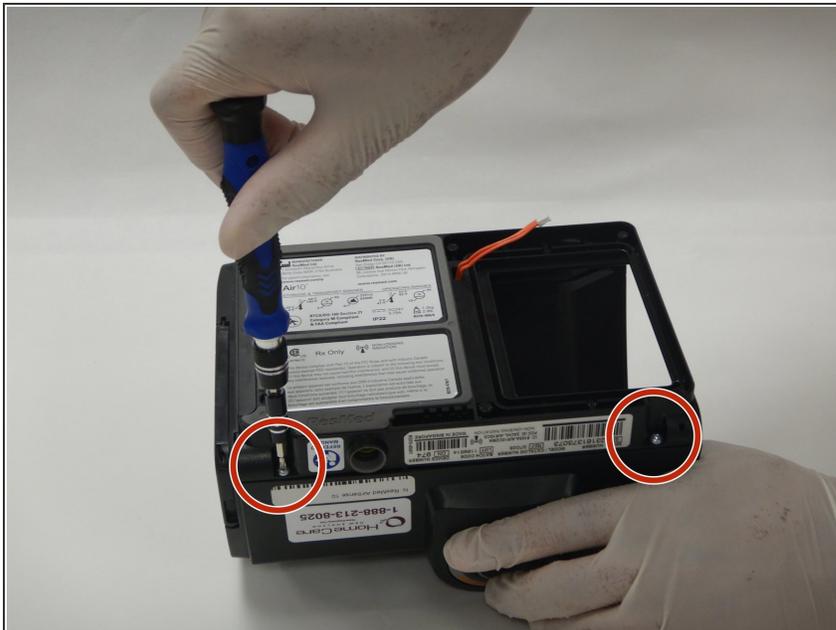



- Svita le due viti Torx T10 da 14 mm rimaste che tengono insieme la cornice.

Passo 7



- Orienta il ResMed AirSense 10 in modo che il retro della macchina sia rivolto verso di te. Lo scarico dell'aria dovrebbe essere rivolto verso di te.
- Usa uno spudger in plastica per fare leva sulla copertura del ResMed AirSense 10 e rimuoverla dall'unità.
- Rimuovi del tutto la copertura dal ResMed AirSense 10.

Passo 8

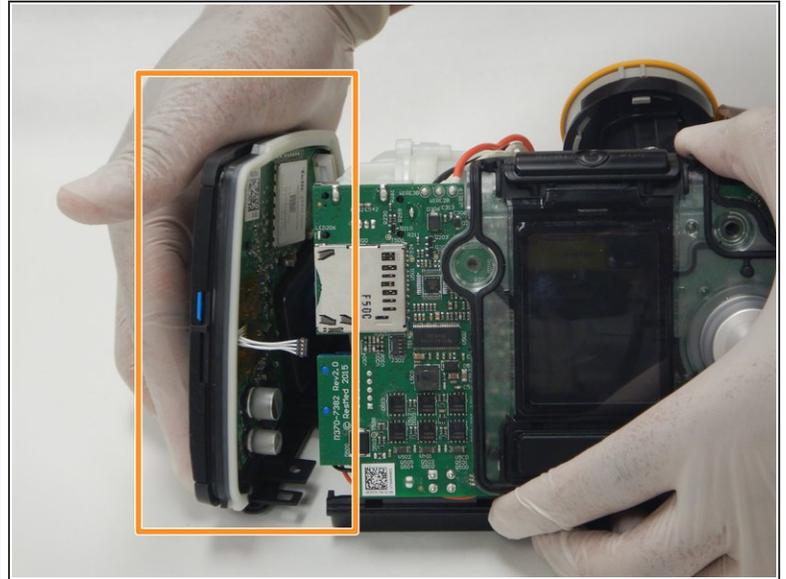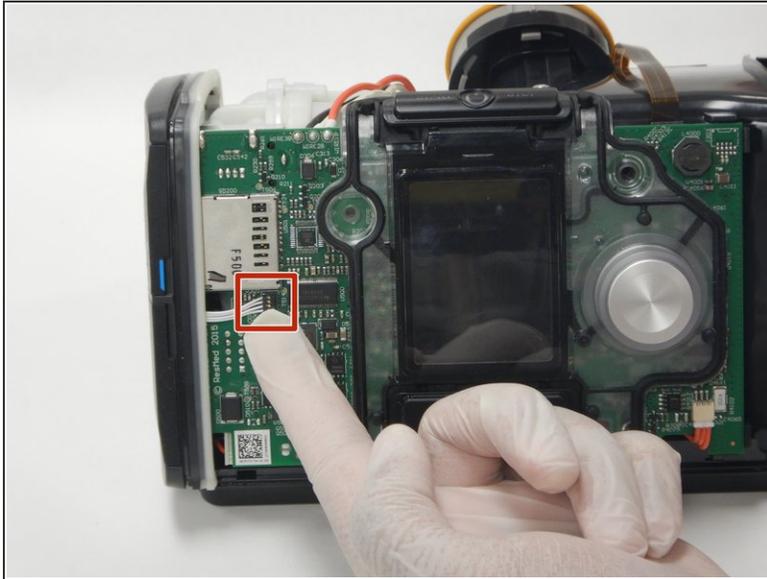


- Posiziona il ResMed AirSense 10 in modo che lo schermo sia rivolto verso di te.
- Scollega attentamente il connettore del cavo a 4 pin posizionato a sinistra dello schermo.
- Rimuovi del tutto il pannello sinistro del ResMed.

Passo 9




- Posiziona il ResMed AirSense 10 in modo che lo scarico dell'aria sia rivolto verso di te.
- Svita la vite Torx T10 da 14 mm che si trova tra lo scarico dell'aria e lo schermo anteriore.
- Rimuovi i cavi dal gancio della copertura della pompa.
- Inizia a rimuovere attentamente la copertura della pompa dal ResMed AirSense 10 finché non scopri il connettore del cavo.

Passo 10

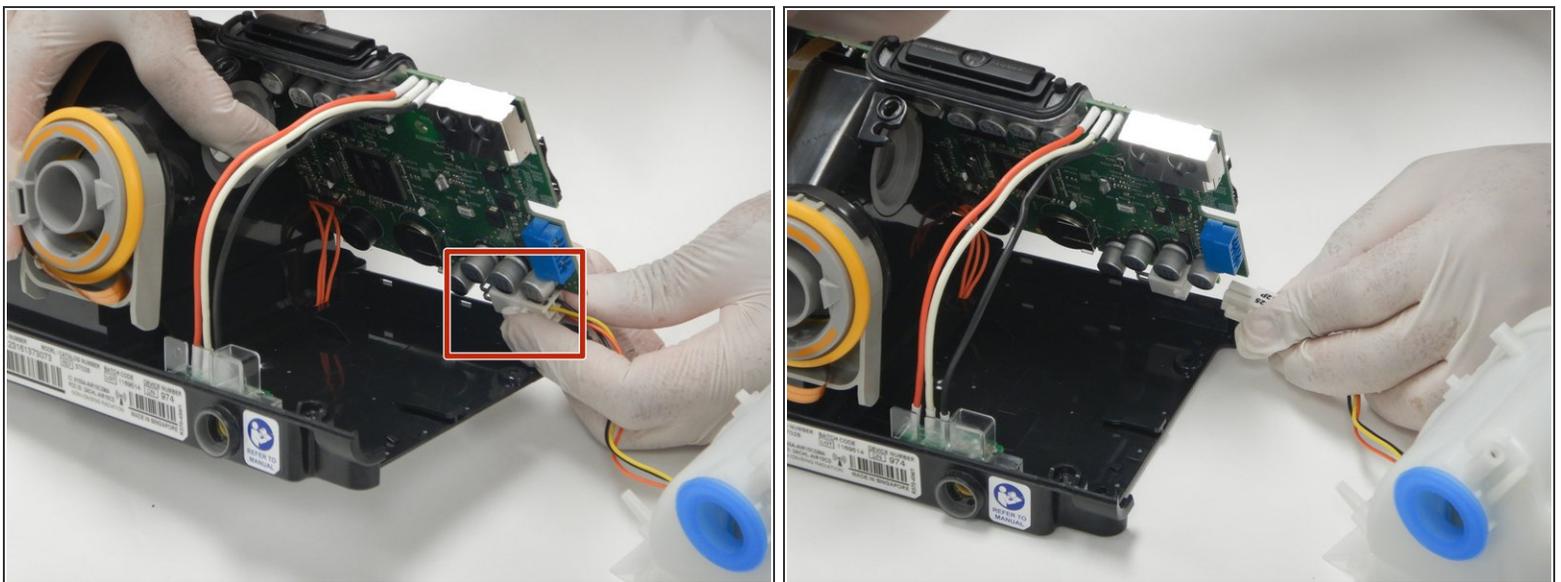


- Rilascia il connettore dei cavi che collega la copertura della pompa alla scheda madre per scollegare completamente la pompa.

Passo 11

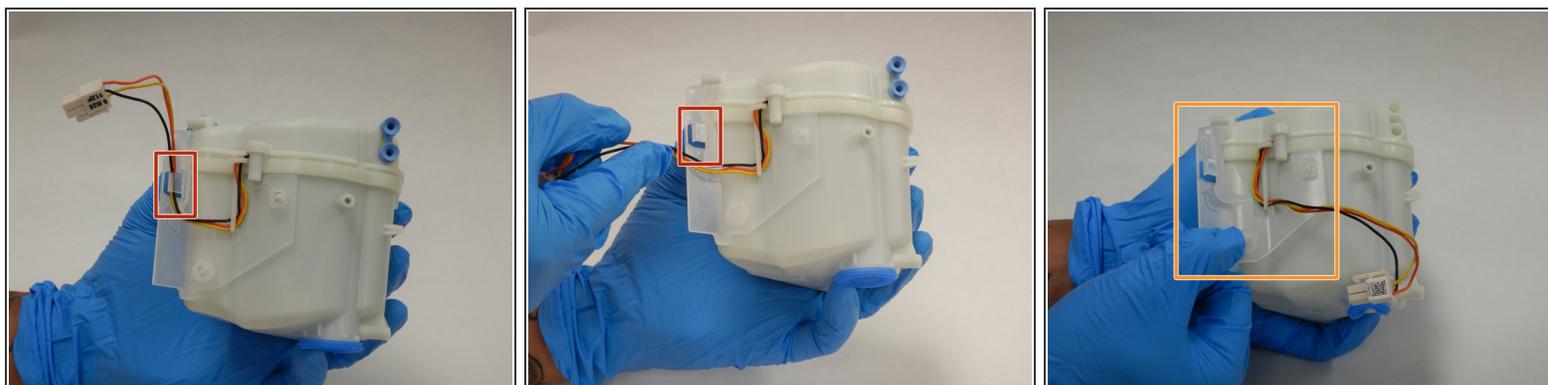


- Orienta la copertura della pompa in modo che i cavi siano rivolti verso di te.
- Rilascia i cavi dal gancio più esterno.
- Quindi rimuovi il blocco in plastica dalla copertura della pompa.

Passo 12

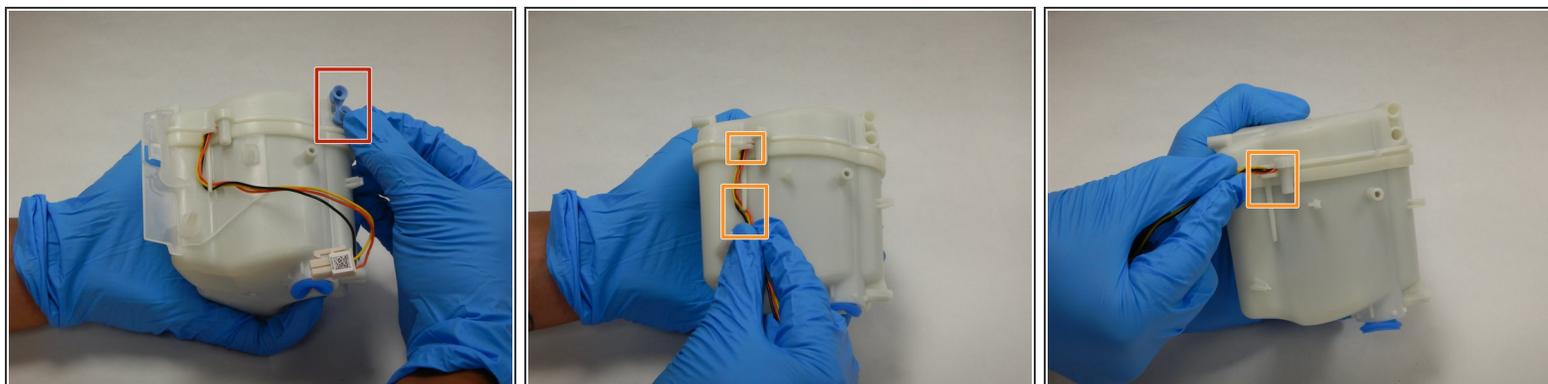

- Rimuovi il cuscinetto in silicone nell'angolo a destra.
- Rimuovi i cavi dai ganci rimasti.

Passo 13

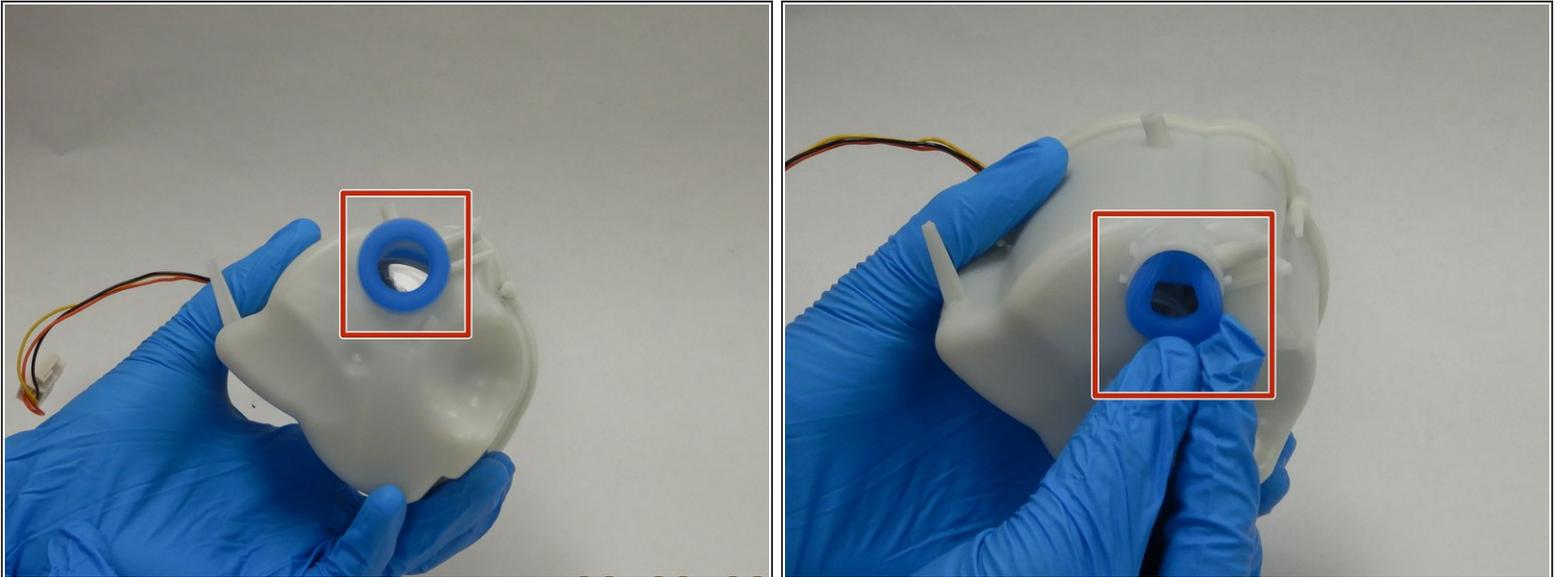


- Orienta la copertura della pompa in modo che la porta di uscita sia rivolta verso di te.
- Spingi l'ugello di uscita nella copertura della pompa.

Passo 14




- Orienta la pompa in modo che le tre viti Torx T10 siano rivolte verso di te.
- Svita le tre viti Torx T10 da 14 mm.
- Solleva la parte superiore della copertura della pompa.

Passo 15

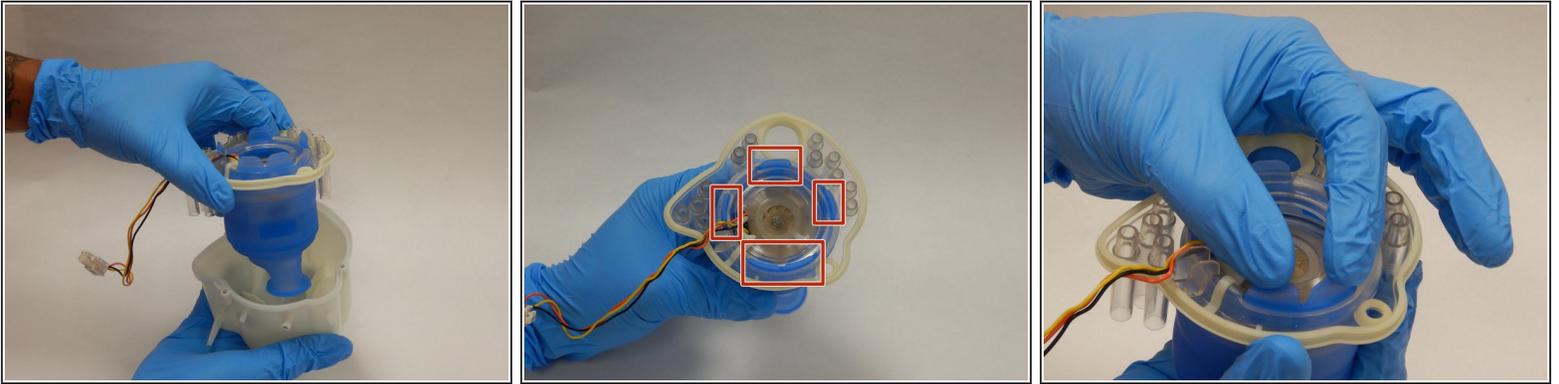


- Rimuovi il gruppo della pompa dalla sua copertura e giralo in modo che la placca di montaggio sia rivolta verso di te.
- ⓘ Dopo aver rimosso il gruppo della pompa, c'è una placca di montaggio che deve essere rimossa per accedere alla pompa.
- ⓘ Ci sono 5 linguette in gomma che collegano la placca di montaggio alla calza in gomma che copre la pompa.
- Spingi le linguette attraverso i fori nella placca di montaggio.

Passo 16

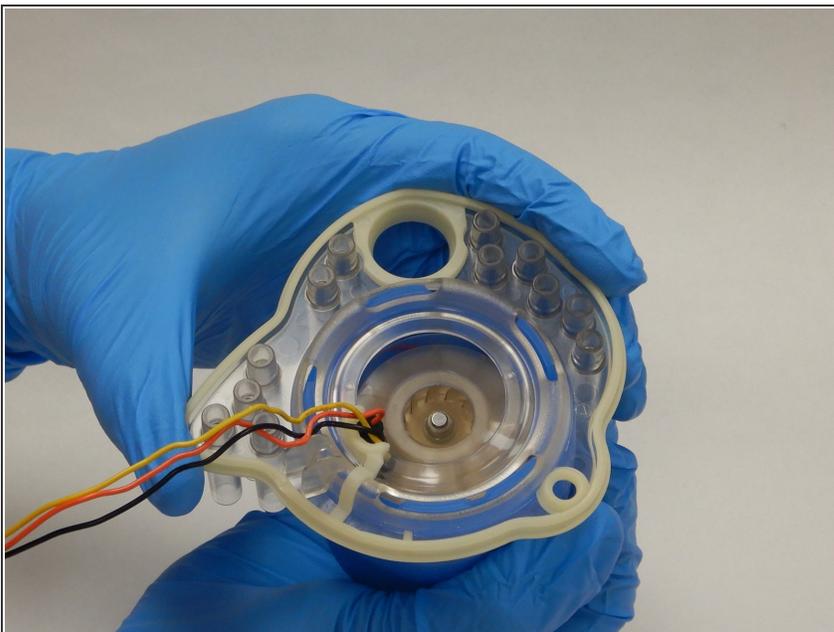

- Separa la placca di montaggio dalla calza in gomma.

Passo 17

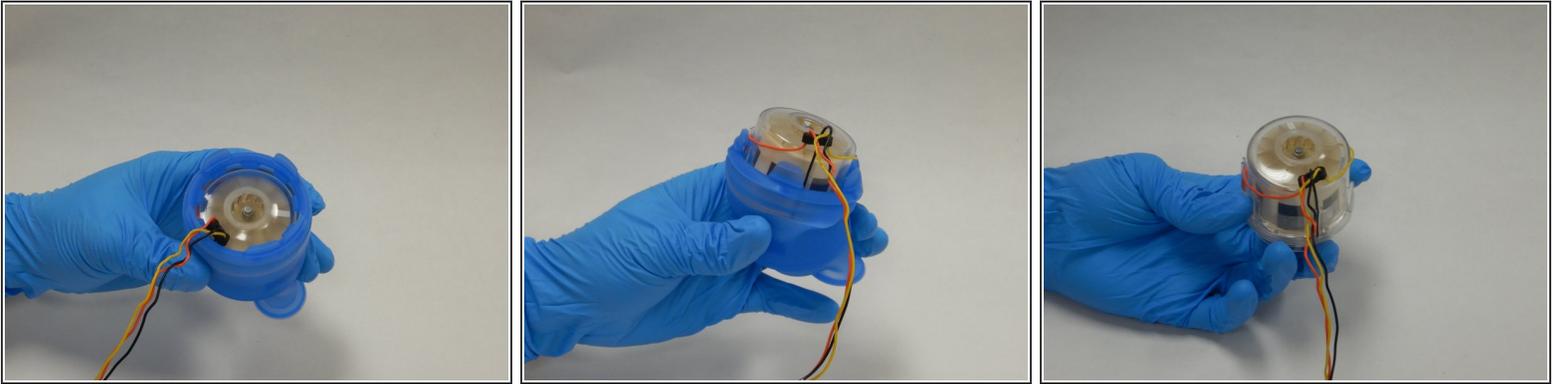

- tira via la calza in gomma per scoprire la pompa.

⚠ Non danneggiare i cavi mentre rimuovi la calza in gomma.

i La pompa scoperta può ora essere pulita e venire ispezionata in cerca di danni.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.